



Grazie per aver scelto lo scongelatore digitale Cito. Lo scongelatore Cito riscalda automaticamente l'acqua e la mantiene alla temperatura giusta. Lo scongelatore Cito è progettato e costruito per garantire ottimo servizio a lungo termine.

DUE ANNI DI GARANZIA

Ogni dispositivo di scongelamento Cito, trovato con difetti di materiale o di fabbricazione entro 2 anni dall'acquisto, può essere riparato o sostituito gratuitamente se spedito con spedizione prepagata alla fabbrica. La garanzia non copre la camera di vetro del thermos.

Nota: I thermos a corrente alternata (AC) non hanno la camera di vetro.

Modelli AI-DCT-120 e AI-DCT-220: Non consigliato l'uso con generatori portatili.

Mantenere le connessioni elettriche pulite e asciutte.

ISTRUZIONI SPEDIZIONE

Impacchettare bene, etichettare

FRAGILE – GLASS

e spedire a:

CITO PRODUCTS, INC.

N8779 COUNTY ROAD X • P.O. BOX 90
WATERTOWN, WI 53094 • U.S.A.

TEL: (920) 261-6646 • FAX: (920) 261-1350

www.citoai.com • sales@citoai.com

FUNZIONAMENTO

1. Riempite lo scongelatore con acqua da rubinetto pulita. Inserite il cavo nella corretta fonte di voltaggio come indicato sulla base del dispositivo. Attendete che il dispositivo di scongelamento riscaldi l'acqua fino a raggiungere la temperatura adeguata. La temperatura iniziale dell'acqua determina il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata. L'acqua viene riscaldata approssimativamente di 1,1 °C al minuto, quindi per raggiungere i 36°C ci vorranno:

da 10°C a 36°C = circa 23 minuti

da 15°C a 36°C = circa 18 minuti

da 20°C a 36°C = circa 13 minuti

da 25°C a 36°C = circa 8 minuti

2. La luce verde accesa indica che il dispositivo ha raggiunto la temperatura impostata ed è pronto all'uso.

3. Miscelare l'acqua muovendo su e giù il cestello estraibile in modo d'assicurare una temperatura uniforme in tutto il bagnomaria.

PROCEDURA PER CONTROLLARE LA TEMPERATURA

4. Dopo aver raggiunto la temperatura corretta dell'acqua, siete pronti per scongelare il seme nel vostro scongelatore Cito.

5. **NOTA:** I nuovi scongelatori Cito hanno un regolatore manuale interno per la regolazione della temperatura. Il vostro scongelatore Cito è stato programmato in fabbrica ad una temperatura di 36°C. Tuttavia, se desiderate cambiare la temperatura prestabilita, la potete regolare nuovamente, rimuovendo le 7 viti sulla base del dispositivo e ruotando il regolatore in senso orario per avere una temperatura più calda, o in senso antiorario per avere una temperatura più fredda. Lasciate che il dispositivo si stabilizzi alla nuova temperatura prima di regolargli nuovamente.

6. Se il dispositivo non mantiene la temperatura corretta, restituite il dispositivo per riparazioni o sostituzione. Speditelo alla fabbrica con i vostri commenti e il vostro indirizzo.

N.B. Gli scongelatori CITO modello CT-I-01-A-37 sono regolati in fabbrica a 37°C